

PRESSY5 compact

Quality
Pharmacy
Products

*Il misuratore di pressione
autonomo, compatto e intelligente
con bracciale adattivo.*



LA TECNOMEDICA[®]
la misura
della professionalità

PRESSY5 compact

Design moderno,

Pressy 5 Compact è il misuratore di pressione automatico e professionale, facile da usare, piccolo e compatto, ma completo di tutte le funzioni, per offrire ai tuoi clienti un servizio qualificato e competente.



Conformità alla norma CEI 64-8/7 senza modifiche all'impianto elettrico della farmacia.

Grazie a uno specifico dispositivo d'isolamento dall'impianto elettrico della farmacia, Pressy 5 non richiede né l'applicazione del nodo equipotenziale né i controlli biennali dell'impianto. Quando viene usato, Pressy 5 si disgiunge totalmente dall'impianto del locale, utilizzando la sua fonte di alimentazione interna.



Memory card

La comodità di una card personale, sempre a portata di mano, dove memorizzare lo storico delle misurazioni. La praticità di uno strumento fidelizzante per la Farmacia e molto utile per il cliente.


affidabilità e precisione al servizio della tua

Farmacia Rossi Dr. Paolo
Via Emilia 345 ROMA

Data 17.02.11 Ora 14.34

SYS DIA PULSE
124 83 76
mmHg mmHg /min

TABULATO PULSAZIONI

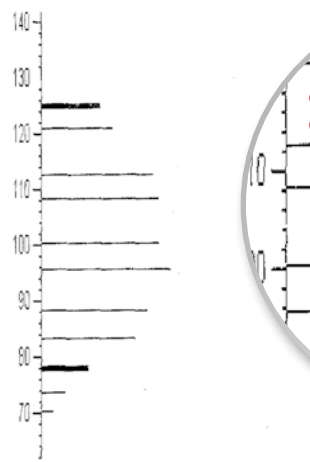

TABULATO MISURE

	SYS	DIA	PLS	Ora	Data
---	109	86	89	14.31	17-02-11
---	120	88	76	14.29	17-02-11
---	137	88	74	09.00	17-02-11
---	124	80	80	15.45	16-02-11
---	126	81	78	15.42	16-02-11
---	125	87	75	15.40	16-02-11
---	129	89	70	15.12	15-02-11
---	130	81	71	10.55	14-02-11
---	117	81	68	16.30	08-02-11
---	120				

Rivolgersi al proprio medico per la diagnosi

Rilevazione delle aritmie

PRESSY 5 riporta sullo schermo la rappresentazione analogica degli impulsi, grazie alla quale è possibile rilevare eventuali aritmie.

Rilevazione dei disturbi

Tramite l'indicazione di tutti gli impulsi rilevati, anche quelli che il software ha scartato, per esempio i movimenti della persona, il medico curante sarà in grado di valutare l'affidabilità dei risultati analizzando la correttezza della misurazione.

FARMACIA ROSSI DR. MARIO
Via Vespucci 434 MILANO

Data 17.02.11 Ora 14.38

SYS DIA PULSE
120 86 84
mmHg mmHg /min

TABULATO PULSAZIONI



TABULATO MISURE

	SYS	DIA	PLS	Ora	Data
---	124	83	76	14.34	17-02-11
---	109	86	89	14.31	17-02-11
---	120	88	76	14.29	17-02-11
---	137	88	74	09.00	17-02-11
---	124	80	80	15.45	16-02-11
---	126	81	78	15.42	16-02-11
---	125	87	75	15.40	16-02-11
---	129	89	70	15.12	15-02-11
---	130	81	71	10.55	14-02-11
---	117	81	68	16.30	08-02-11

Rivolgersi al proprio medico per la diagnosi



a farmacia.

Quality
Pharmacy
Products



Funzionamento a monete

La gettoniera elettronica è installata sul fronte della macchina e accetta tutti i tagli di monete da 0,10 a 2,00 euro. È pratica da utilizzare e comoda da svuotare.




Memory card multifunzione

La memory card, grazie al microchip incorporato, può essere utilizzata come una carta ricaricabile: a ogni utilizzo viene detratto l'importo dovuto e una volta esaurito il credito, la carta può essere ricaricata con l'importo desiderato.

Gestione autonoma della tariffa

La tariffa può essere facilmente programmata e variata in qualsiasi momento senza richiedere alcun intervento tecnico.

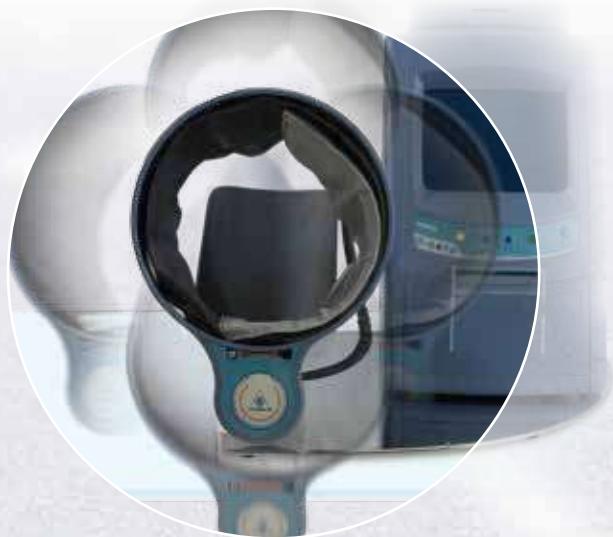

Bracciale adattivo

mobile in senso verticale e orizzontale

Pressy 5 Compact favorisce comfort e rilassamento alle persone di tutte le altezze e corporature, evitando che il cliente, per adattarsi a un bracciale fisso, sia costretto ad assumere una posizione scorretta che potrebbe compromettere il risultato della misurazione.

Colori disponibili



COD. 501
RAL 6034



COD. 502
RAL 1000



COD. 503
RAL 5014

Connessioni tramite

USB



Connessione USB

La connessione USB consente, utilizzando un comune pc, di intestare lo scontrino o modificare l'intestazione, con la possibilità di utilizzare marchi e grafiche personalizzate.



LA TECNOMEDICA
La misura
della professionalità

compattezza e facilità d'uso.

Quality
Pharmacy
Products

Caratteristiche

Vantaggi

MISURAZIONE DELLA PRESSIONE E DELLA FREQUENZA DEL POLSO

La misurazione della pressione sistolica (massima) e diastolica (minima) da **280 a 40 mm/Hg** con risoluzione di **1,5 mm/Hg** e la misurazione della frequenza del polso da **0 a 250 puls/min** con risoluzione di **1 puls/min**.

L'utilizzo dei metodi **Riva-Rocci-Korotkoff** e **Oscillometrico**, le tecniche più utilizzate per misurare la pressione, garantiscono **precisione e affidabilità**, secondo i parametri richiesti dai più importanti organismi internazionali.

MEMORIZZAZIONE E VISUALIZZAZIONE DATI

I dati vengono stampati su una scheda che riporta, oltre **l'intestazione della farmacia**, i risultati della misurazione e quelli storici, anche il grafico di tutte le pulsazioni, evidenziando le eventuali aritmie.

È possibile inserire nello scontrino **diciture personalizzate della farmacia**. La sostituzione dei rotoli di carta termica è estremamente semplice.

BRACCIALE MOBILE ADATTIVO

È adatto a braccia con circonferenza da **21 a 35 cm** e dotato di uno snodo che gli consente di muoversi e oscillare in tutti i sensi.

Il cliente può assumere una **posizione naturale** e non forzata, così la postura è corretta e **non compromette la precisione della misurazione**.

COMPRESSIONE PERSONALIZZATA E DECOMPRESSIONE STABILIZZATA DEL BRACCIALE

La compressione è relativizzata al livello pressorio individuale, mentre la decompressione è stabilizzata elettronicamente.

Si evita un'eccessiva compressione del braccio, mentre la velocità di decompressione è mantenuta costantemente tra 2 e 3 mm/Hg al secondo, indipendentemente dalla dimensione del braccio.

MEMORY CARD

Memory card personale. Consente di archiviare in **memoria fino a 120 misurazioni**.

Riporta l'intestazione della Farmacia e contiene i dati personali del cliente. Costituisce un formidabile strumento di fidelizzazione.

FUNZIONAMENTO A MONETA O CARD SOTTO IL CONTROLLO AUTONOMO DEL FARMACISTA

La **gettoniera elettronica** è in grado di accettare monete da **0,10 - 0,20 - 0,50 e 1,00 euro**. Il pagamento può essere effettuato anche scalando l'importo dal credito inserito nella memory card.

La memory card può essere ricaricata in qualsiasi momento e contiene anche i dati relativi alle misurazioni della pressione eseguiti con i nostri apparecchi. La tariffa e le successive variazioni possono essere effettuate autonomamente dalla farmacia, senza intervento tecnico.

ALIMENTAZIONE

PRESSY 5 funziona in bassa tensione (24V DC). Oltre a ciò, è dotato di un circuito con batterie ricaricabili che forniscono l'alimentazione durante il ciclo della misurazione. In tal modo l'apparecchio viene a essere galvanicamente separato e indipendente dall'impianto elettrico della farmacia.

Non si rende necessario alcun adeguamento dell'impianto elettrico della farmacia ai sensi della norma **CEI 64-8/7 ed. V 06/2004**.

DISPLAY 5,7" MONOCROMATICO

Tutte le informazioni vengono riportate su un monitor 5,7" monocromatico.


Display LCD retroilluminato.

COLLEGAMENTI ESTERNI

Interfaccia **USB**.

Consente di **collegarsi al computer della macchina da un pc esterno**.

ALTRI DATI TECNICI

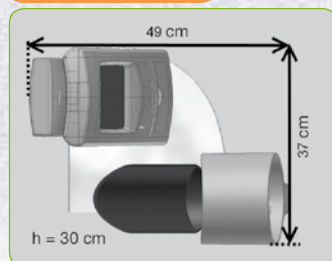

Peso: 8,3 kg · **Temperature** di funzionamento da 10° a 40° C
Temperatura di **immagazzinamento** da 0° a 60° C
Umidità max: 85% RH · **Alimentazione esterna:** 100÷240V / 50-60Hz.

CE 0051